

上肢用ハンドル 取扱説明書

1. 内容物




ハンドホルダ（ボルト付）：2個

六角棒レンチ：1本

※ 上肢ハンドルのカラーは変更する場合があります。

2. 取付方法

(1)ハンドホルダ底面に付いている2本のボルトを外します。

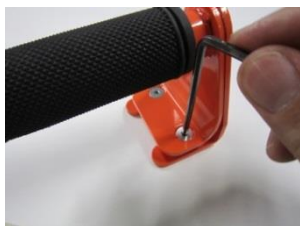


(2)ハンドホルダのグリップ部のボルトを緩めます。



ボルトを緩めた状態

(3)下図のようにハンドホルダをペダルに差し込みます。

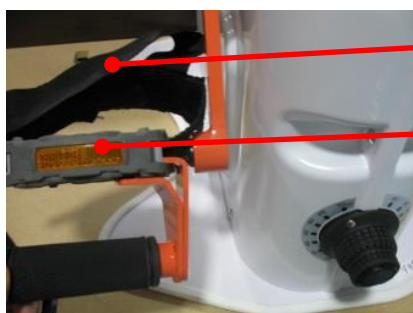

ペダルストラップ

ペダル

(4)3本のボルトを六角棒レンチで締め付けます。



(5)反対側も同様に行い、最後に増し締めをしてガタツキがないことを確認してください。