


固定補助板（てらすエルゴ）

取扱説明書


1. 内容物

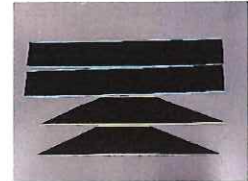


固定補助板(1枚) ベルト(長) 1.5m : 2本 ベルト(短) 0.4m : 2本 マジックテープ:各2枚

2. 準備

(1)エルゴメータ（負荷調整ダイヤル側の底面）および固定補助板にマジックテープを貼ります。

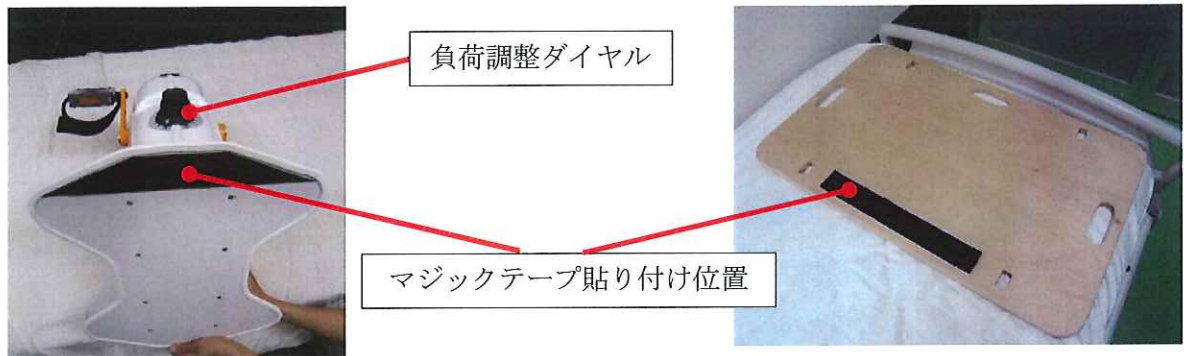

3. 設置方法 ※写真は 左側：ベッドの足元側、右側：ベッドの頭部側 の向きとなります。

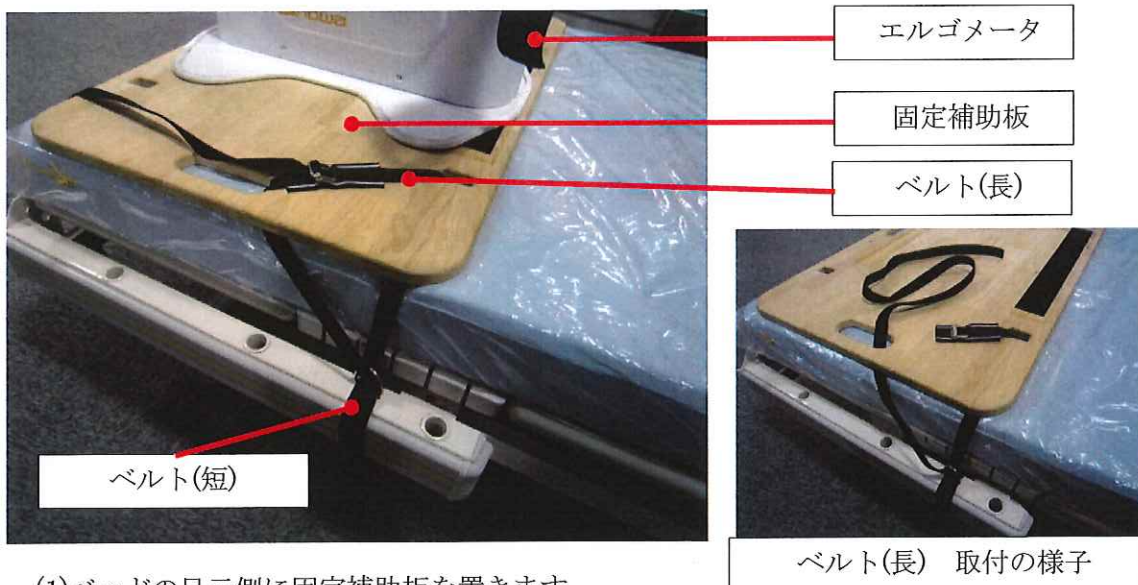

(1)ベッドの足元側に固定補助板を置きます。

※マジックテープが頭部側上面となるように設置します。

(2)左右のベッドフレームにベルト（短）をリングが上部にくるように巻いて取付けます。

(3)ベルト（長）を固定補助板→ベルト（短）に付属されたリング→固定補助板の順に通します。

※ベルト（長）の締め込みは、ベッドの左右共に通した後で行ってください。

(4)マジックテープの位置を合わせながら、エルゴメータを置き、上からしっかりと押さえて下さい。

(5)最後に、エルゴメータを手で揺さぶり固定されているかを確認して下さい。 —作業終了—